


NEUTEC[®] LT 396

Alkoholische Sprüh- & Wischdesinfektion

aldehydfrei, duft-,
farbstoff- und
tensidfrei

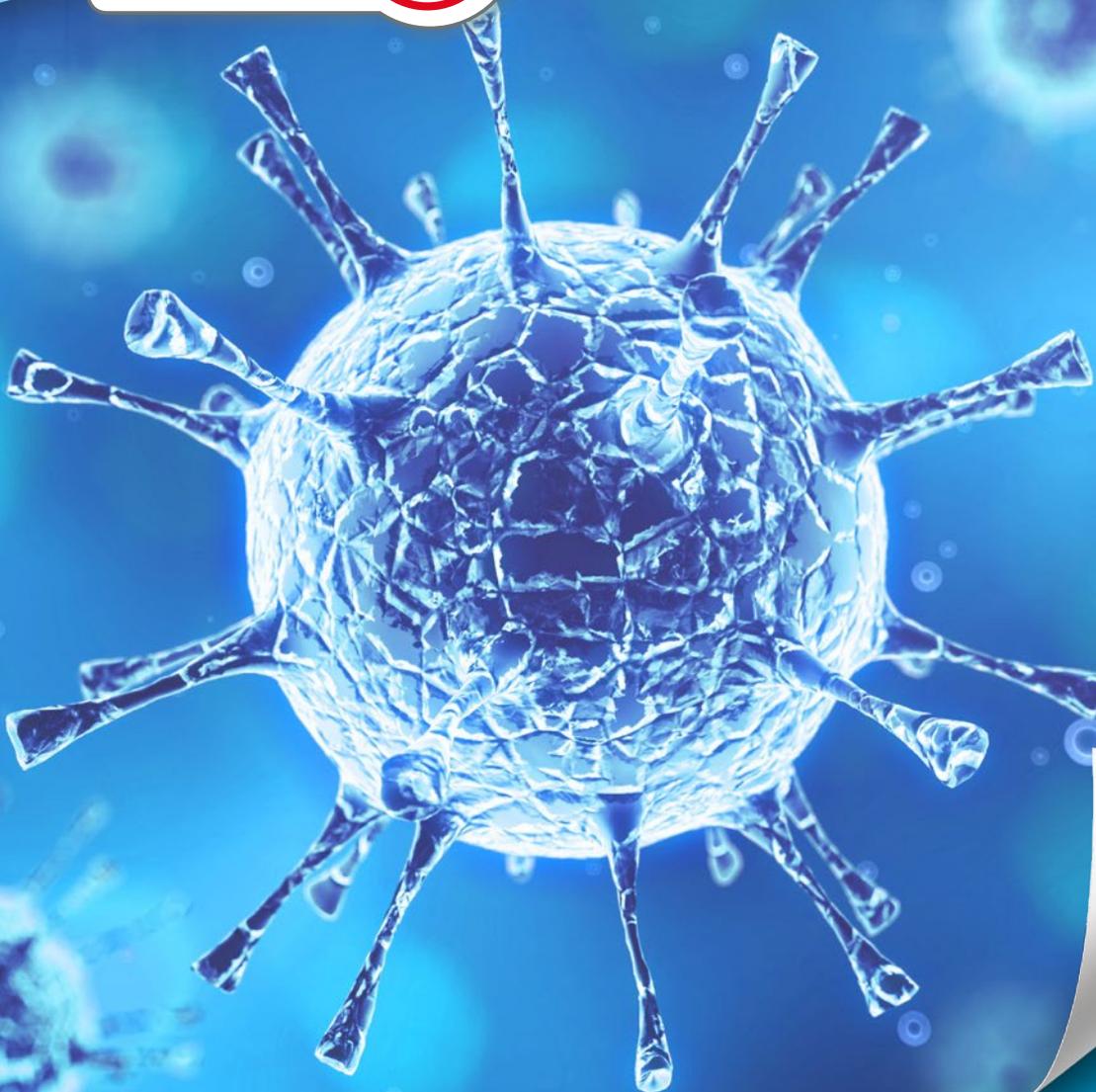

Alles aus einer Hand!
Bei uns finden Sie das
passende Zubehör
für Ihr Produkt.



Tipp:

Fragen Sie uns nach weiteren Präparaten unseres Hygienesystems wie z. B.:

- **ALTEC® LT 395** – QAV-freie Desinfektionsreinigung
- **NEUTEC® LT 349** – Händedesinfektionsgel
- **NEUTEC® LT 228** – sensitive Flüssigseife

100 g Flüssigkonzentrat enthalten als Wirkstoff 63,1 g 2-Propanol und Wasser.

- ➔ aldehydfreie Gebrauchslösung als schnell wirkende, alkoholische Sprüh-, Wisch- und Gießdesinfektion im Lebensmittel- und medizinischem Bereich
- ➔ duftstoff-, farb- und tensidfrei
- ➔ PT 2 (Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind): bakterizid (inkl. tuberkulozid), levurozid und behüllte Viren
- ➔ PT 4 (Lebens- und Futtermittelbereich): bakterizid (inkl. tuberkulozid) und levurozid
- ➔ VAH-gelistet, EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 13697, EN 16615

Einsatzgebiete:

Für Oberflächen in Lebensmittelherstellung und -verarbeitung, medizinischen Bereichen, in Pflegeeinrichtungen (Altenheime, etc.), Forschung und Industrie, Wellness/Sport, etc.

Anwendung:

Sprühen: NEUTEC® LT 396 unverdünnt auf die vorgereinigten Flächen durch Sprühen aus einer Distanz von 20 – 30 cm anwenden. Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche vollständig feucht ist und lassen Sie das Produkt 1 Minute (nicht-medizinischer Bereich) bzw. für 2 Minuten (medizinischer Bereich) wirken.

Sprühen und Wischen: NEUTEC® LT 396 unverdünnt auf die vorgereinigten Flächen durch Sprühen aus einer Distanz von 20 – 30 cm anwenden und im Anschluss nachwischen oder ein Tuch durch Sprühen befeuchten und die Oberfläche damit wischen. Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche vollständig feucht ist und lassen Sie das Produkt 1 Minute wirken.

Gießen und Wischen: NEUTEC® LT 396 unverdünnt auf die vorgereinigten Flächen gießen und danach wischen oder das Produkt mit einem Tuch aufnehmen und die Oberfläche mit dem vollgesogenen Tuch wischen. Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche vollständig feucht ist und lassen Sie das Produkt 1 Minute wirken.

Biozid-Zulassungsnummer: DE-0025190-03-0002-04
Zulassungsinhaber: NEUTEC CHEMIE GmbH

BIOZID PT 2 & PT 4 BIOZIDPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN.

Bei der Lebensmittelherstellung und -verarbeitung sollte NEUTEC® LT 396 nur versprüht werden, wenn keine offenen Lebensmittel in der Nähe sind.

Flammpunkt: 19°C. Maximale Ausbringung 50 ml/m². Darf nicht bei alkoholempfindlichen Materialien wie z. B. Acrylglas (Solarien) eingesetzt werden. Das Produkt dient nur zu Desinfektion von kleinen Oberflächen. Lagerung nur bei Raumtemperatur und im Originalgebinde!

Nur für den gewerblichen Gebrauch!
Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com

Preis pro Einheit:

Anzahl:

Ihr Preis: